


bis auf Gesamtlänge 32,6 cm verlängern Teil 1

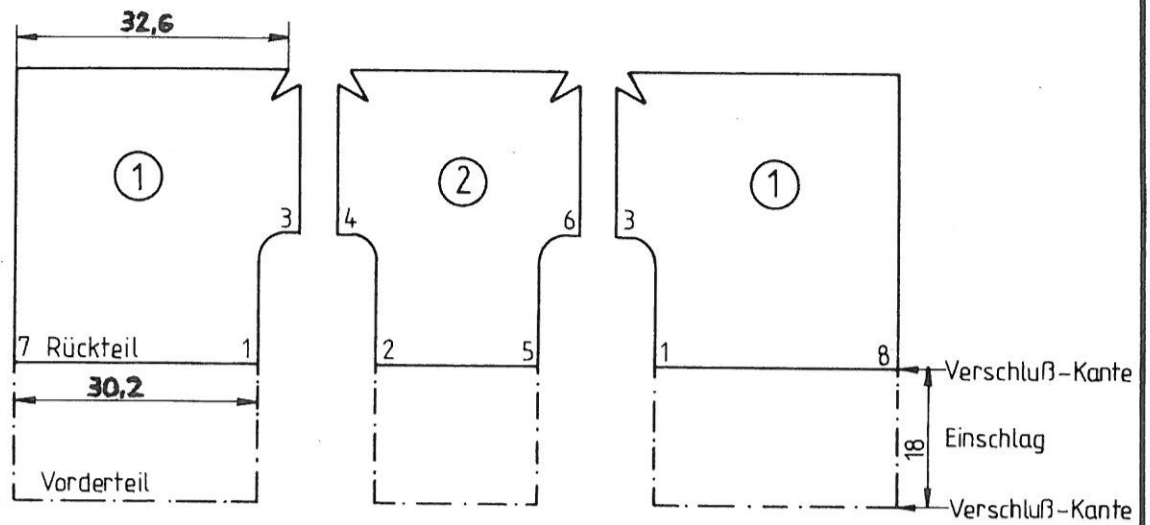

Schnittmuster

ZUSCHNITT

Rückenteile	Teil 1	2 x Zuschneiden und angegebene Verlängerungen
	Teil 2	1 x Zuschneiden
Vorderteile	Teil 1	2 x Zuschneiden und angegebene Verlängerungen + 18 cm für Einschlag
	Teil 2	1 x Zuschneiden + 18 cm für Einschlag
Schnittmuster	incl.	7 mm Nahtzugabe


NÄHANLEITUNG

- 1) Abnäher schließen
- 2) Seitenteile 1 je re. + li. mit Teil 2 verbinden und zwar Punkt 1 auf Punkt 2 bis Punkt 3 auf Punkt 4 verbinden

ebenso Punkt 1 auf Punkt 5 bis Punkt 3 auf Punkt 6 verbinden.

Nähte versäubern.

- 3) Am Rückenteil Verschlußkante versäubern, 1 cm einschlagen und feststeppen.
- 4) Am Vorderteil Verschlußkante versäubern.
- 5) Rückenteil auf Vorderteil legen. (Rechte Stoffseite, auf rechte Stoffseite), - überstehender Einschlag (Vorderteil) auf das Rückenteil legen, - Rückenteil mit Vorderteil verbinden, beginnend an Punkt 7, bis Punkt 8

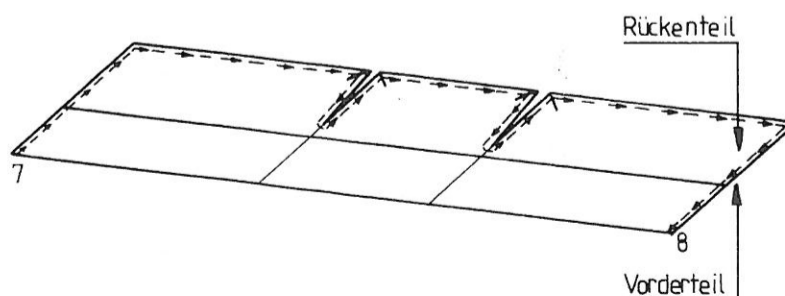

(verlaufender Naht, sh. gestrichelte Linie -----), - Nähte versäubern.

- 6) Bezug auf die rechte Seite ziehen, Verschlußkante je ca. 10 cm rechts und links zusteppe.

Stoffbruch Teil 2

bis auf Gesamtlänge 30,2 cm verlängern Teil 1

Vorderteil um 18 cm verlängern !